




**JAS DYNAMIC**

## AJUSTE DEL DISPOSITIVO

### DE PRONACIÓN / SUPINACIÓN

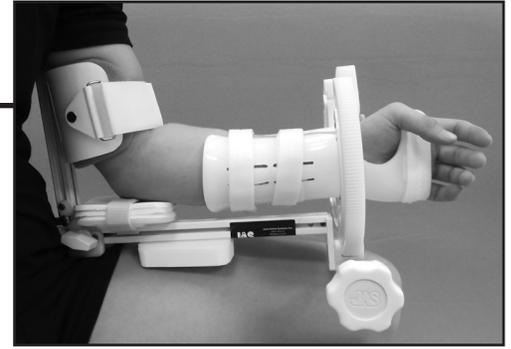


## Se muestra el dispositivo para el lado izquierdo

### PRONACIÓN

(Gire la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj)

Cartucho de resortes

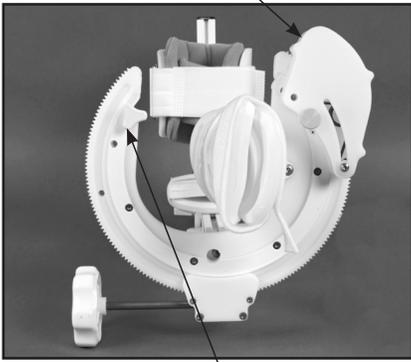


Clavo sujetador

### SUPINACIÓN

(Gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj)


Cartucho de resortes

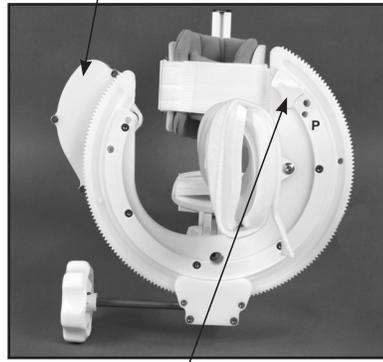

Clavo sujetador

Los clavos sujetadores del cartucho de resortes van en la posición que se muestra abajo. El cartucho de resortes estará en el lado del aparato marcado con una "S" para supinación.

Los clavos sujetadores del cartucho de resortes van en la posición que se muestra abajo. El cartucho de resortes estará en el lado del aparato marcado con una "P" para pronación

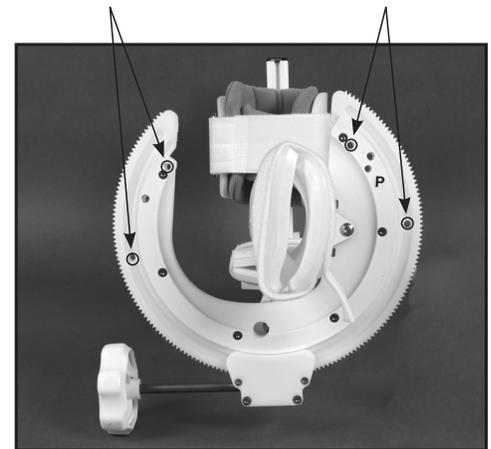

**BLOQUEO DINÁMICO:** Este dispositivo se proporciona con un clavo sujetador en la posición dinámica. Para bloquear la función dinámica, retire el cartucho de resortes y coloque el clavo sujetador en una de las posiciones que se muestran abajo.

Clavo sujetador



Neutral

Clavo sujetador



Pronación adicional

Clavo sujetador




Supinación adicional



# JAS DYNAMIC INSTRUCCIONES DE AJUSTE

## PARA LA PRONACIÓN / SUPINACIÓN


La mejor forma de realizar su sesión de terapia JAS es sentado cómodamente. El dispositivo puede apoyarse sobre su regazo o a un lado. Usted no debe estar de pie caminando durante una sesión de tratamiento JAS.

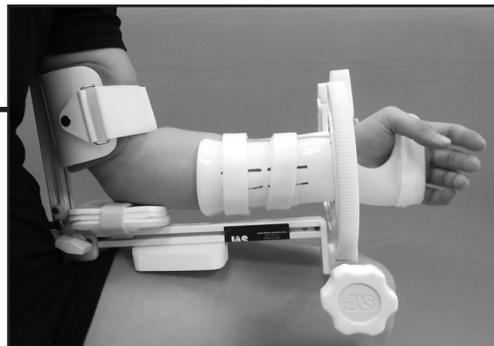

### PASO 1:

#### AJUSTE EL LARGO DEL ANTEBRAZO (Si es necesario)


**NOTA:** Este ajuste se hace una sola vez y debe hacerlo su terapeuta o representante de JAS en el ajuste inicial.

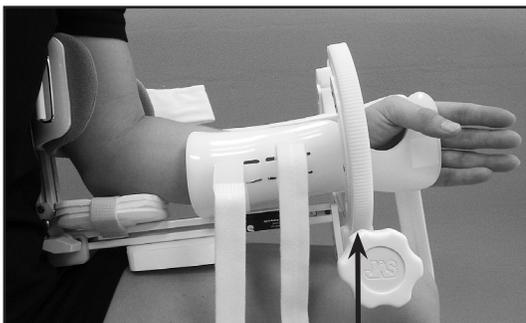

#### Alinee la estiloides cubital con el aparato

- Coloque el brazo en el dispositivo. Asegúrese de colocar el codo firmemente en la parte posterior del dispositivo, como el talón en una bota.
- Baje completamente la mano para acomodarla entre las dos láminas.
- Asegúrese de que la estiloides cubital está alineada con el aparato.

**NOTA:** Si necesita ajustar la férula para el bíceps hacia arriba o hacia abajo para mayor comodidad, afloje los tornillos ubicados debajo de la funda removible en la férula para el bíceps y vuelva a colocar la férula.

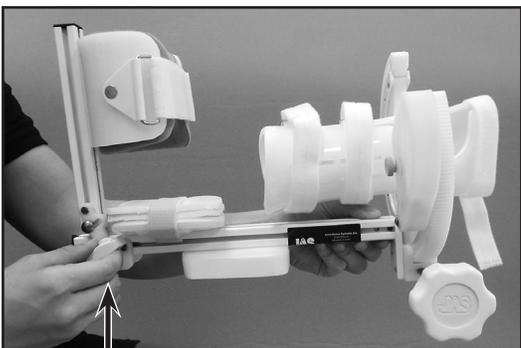


#### Perilla de ajuste de largo

- Si es necesario ajustar el largo, retire el brazo del dispositivo, afloje la perilla de ajuste de largo, deslice la férula para el bíceps hacia el frente o hacia atrás para obtener la posición correcta y vuelva a apretar la perilla.


**SUGERENCIA:** Marque con un marcador permanente el puntal de la férula para el bíceps para estar seguro de la posición correcta en caso de que se mueva.

### PASO 2:

#### ASEGURE TODAS LAS CORREAS

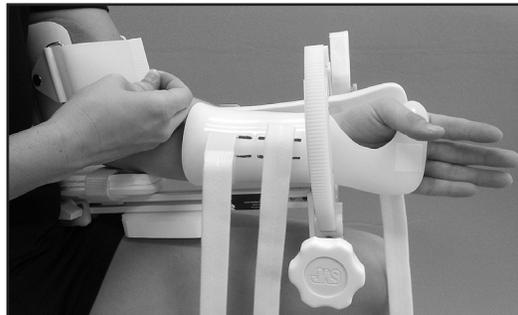


- Asegure las correas de la férula del brazo de forma que quede cómodamente ajustada.

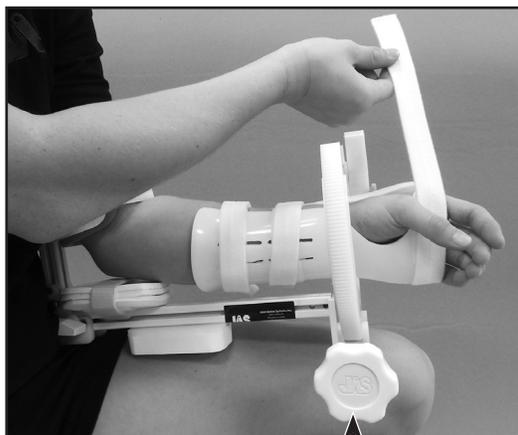

#### Perilla de terapia

- Asegure las correas en la muñeca y la palma hasta que la mano quede cómoda en el soporte para la mano.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de jalar las correas para cerrar el espacio en la parte inferior del soporte para la mano de forma que las láminas para la mano tengan un ajuste uniforme en toda la muñeca.

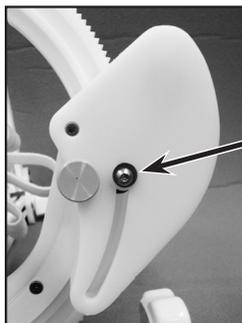

- Comience el tratamiento girando la perilla de terapia para emplear fuerza dinámica. Cuando el tornillo está al final de la ranura, se aplica la máxima fuerza dinámica
- Siga el protocolo para tratamiento en la siguiente página



**Las siguientes son sólo pautas. Si en algún momento siente dolor, quítese el aparato JAS Dinámico y contacte a su vendedor de Joint Active Systems.**

**PASO 1: Determine la tensión del tratamiento:** Ubique la extremidad al final del campo activo de movimiento antes de colocarse el aparato JAS Dinámico. Una vez que el aparato está colocado, rote la perilla de ajuste hasta que siente la tensión/resistencia del resorte. Continúe rotando la perilla de ajuste hasta que sienta un estiramiento de baja intensidad.

**PASO 2: Determine el tiempo del tratamiento:** El máximo tiempo de tratamiento deberá ser establecido por el médico o terapeuta del paciente. Comience con 1-2 horas de uso hasta llegar a 6-8 horas de uso continuo por día.

Si durante la sesión de tratamiento siente que el estiramiento se afloja mucho, vuelva a girar la perilla hasta volver a sentir la resistencia del resorte y un estiramiento leve.

Si no puede usarlo por largos períodos de tiempo, baje la tensión.

**PASO 3: Para quitar el aparato JAS Dinámico:** Cuando haya terminado su sesión, gire la perilla de ajuste en la dirección opuesta hasta quitar la tensión del resorte y quítese el aparato.

## IMPORTANTE:

Use el aparato JAS Dinámico cuando esté inactivo, preferiblemente mientras duerme. Si no puede dormir con él, úselo tanto tiempo como le sea posible durante el día.

El tiempo que lleva el aparato es el componente más importante para recuperar el movimiento. *Aumentar la tensión a niveles que causen dolor no garantiza la aplicación de un estiramiento apropiado.*

En caso de hinchazón o irritación de la piel, deje de usarlo y contacte a su médico.

## APOYO TÉCNICO

Para recibir ayuda técnica y por preguntas con respecto a su aparato JAS, llame gratis al **(800) 879-0117**.

## ALQUILER DEL APARATO

Este es un aparato alquilado. Al fin de su tratamiento **es su responsabilidad** contactar a JAS para cancelar la facturación y coordinar la devolución del aparato.



### Joint Active Systems, Inc.

2600 South Raney • Effingham, IL 62401

TELF: (217) 342-3412 o (800) 879-0117

Correo electrónico: [info@jointactivesystems.com](mailto:info@jointactivesystems.com)

**[www.jointactivesystems.com](http://www.jointactivesystems.com)**

Cubierto por una o más patentes de los EE. UU. Otras patentes están en trámite.

Autorizado en el Estado de Illinois.