



FLEXIÓN / EXTENSIÓN DE MUÑECA
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN





JAS DYNAMIC WRIST FLEXION

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


Lo mejor es completar la terapia JAS en una posición sentada y cómoda.

NO ESTAR DE PIE O CAMINAR MIENTRAS USA EL DISPOSITIVO

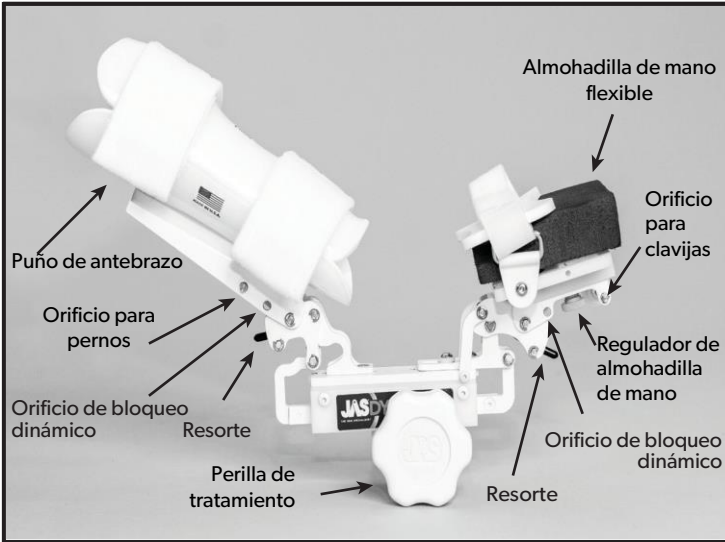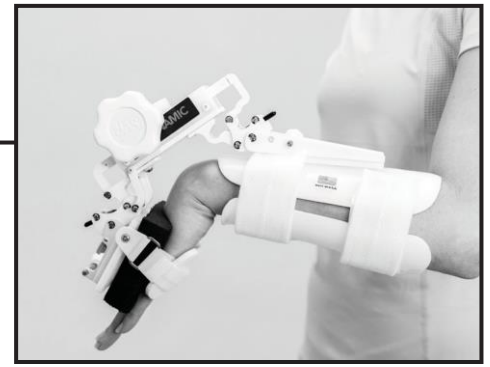


Bloqueo dinámico: Este dispositivo está configurado con los pernos en la posición dinámica. Para bloquear la función dinámica, reubique los pernos en los orificios de bloqueo dinámico como se muestra arriba.

PASO 1: COLOCAR LA ALMOHADILLA FLEXIBLE PARA MANOS

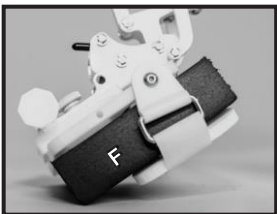

- Coloque sólo la almohadilla flexible en el dispositivo.
- La almohadilla flexible para manos tendrá la letra "F".
- El extremo más grueso de la pieza debe apoyarse en la parte superior de la mano, en el lado del meñique.

PASO 2: COLOCACIÓN DEL BRAZO EN EL DISPOSITIVO

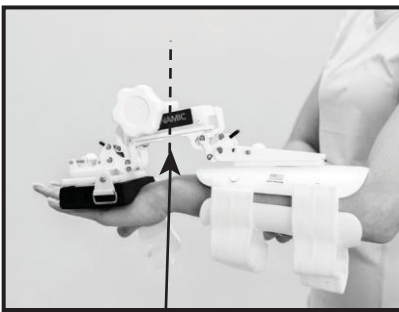


CENTRO DE LA MUÑECA

- Afloje todos los tirantes
- Coloque el dispositivo en extensión completa girando la perilla de tratamiento.
- Coloque el dispositivo en el dorso de la mano y el antebrazo. Alinee de manera que el marco quede centrado sobre la muñeca.


- Gire el mando de tratamiento para mover el dispositivo en flexión hasta que el ángulo coincida aproximadamente con el ángulo de flexión de la muñeca.

PASO 3: AJUSTE DE LA ALMOHADILLA DE MANO

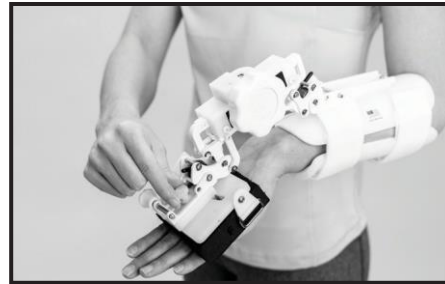

- Utilice el regulador de almohadilla de mano para posicionar el extremo de la almohadilla en la muñeca, aproximadamente 1" por encima de los nudillos.

PASO 4: ASEGURE LAS CORREAS

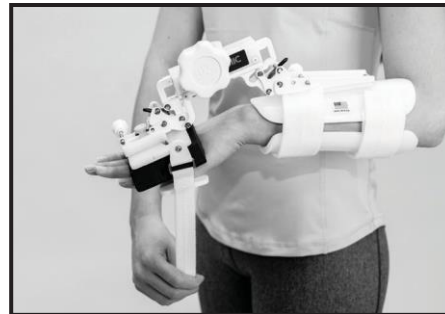

- Asegure las correas, de modo que todas estén cómodamente ajustadas.

PASO 5: INICIAR EL TRATAMIENTO



- Gire la perilla de tratamiento en el sentido de las agujas del reloj hasta que los resortes se compriman.

NOTA: Si siente demasiada presión, libere la presión girando la perilla de tratamiento en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Comience el tratamiento girando la perilla de tratamiento según las indicaciones de su médico o terapeuta.

- Al final de la sesión de terapia, libere la presión girando la perilla de tratamiento en sentido contrario a las agujas del reloj, desate las correas y retire el dispositivo.





JAS DYNAMIC™ WRIST EXTENSION

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Lo mejor es completar la terapia JAS en una posición sentada y cómoda.

NO ESTAR DE PIE O CAMINAR MIENTRAS USA EL DISPOSITIVO

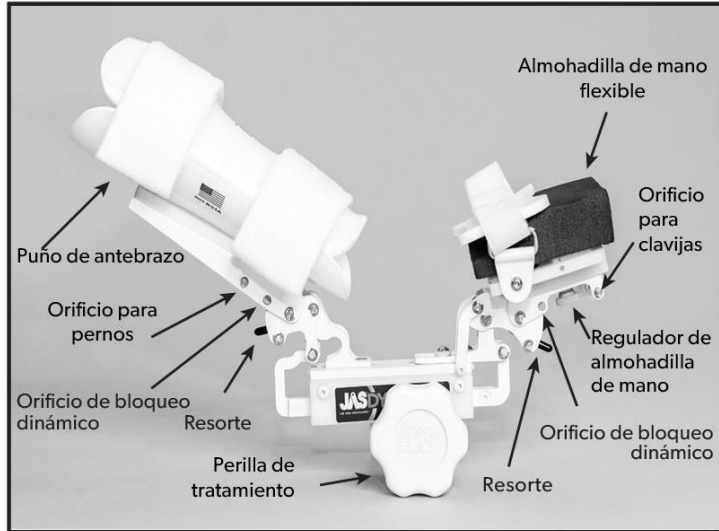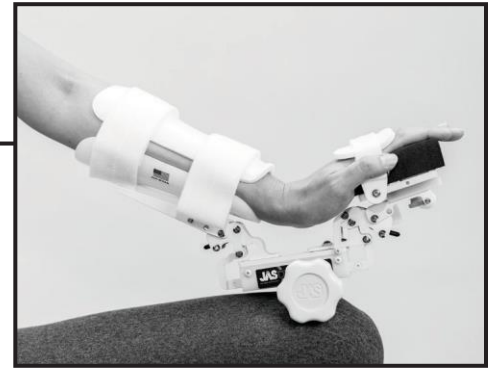


Bloqueo dinámico: Este dispositivo está configurado con los pernos en la posición dinámica. Para bloquear la función dinámica, reubique los pernos en los orificios de bloqueo dinámico como se muestra arriba

PASO 1: COLOCAR LA ALMOHADILLA EXTENSIBLE DE MANOS




- Coloque sólo la almohadilla extensible en el dispositivo.
- El borde más fino de la pieza debe quedar debajo de la palma de la mano.

PASO 2: COLOCACIÓN DEL BRAZO EN EL DISPOSITIVO

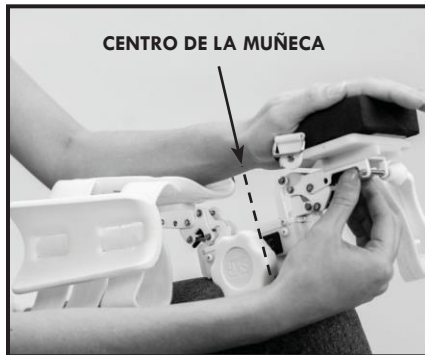


- Afloje todos los tirantes
 - Coloque el dispositivo en extensión completa girando la perilla de tratamiento.
 - Coloque el dispositivo en el dorso de la mano y el antebrazo. Alinee de manera que el marco quede centrado sobre la muñeca.
- Gire el mando de tratamiento para mover el dispositivo en flexión hasta que el ángulo coincida aproximadamente con el ángulo de flexión de la muñeca.

PASO 3: AJUSTE DE LA ALMOHADILLA DE MANO

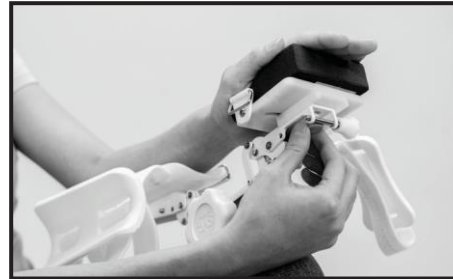


- Utilice el regulador de almohadilla de mano para posicionar el extremo de la almohadilla en la muñeca, aproximadamente 1" por encima de los nudillos.

PASO 4: ASEGURE LAS CORREAS

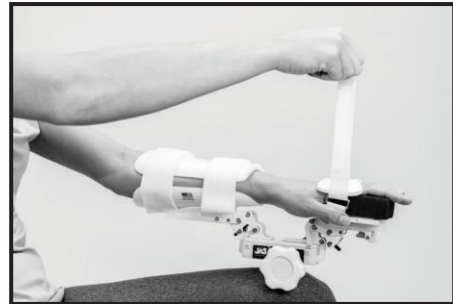

- Asegure las correas, de modo que todas estén cómodamente ajustadas.

PASO 5: INICIAR EL TRATAMIENTO

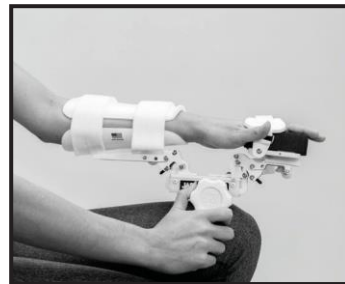

- Gire la perilla de tratamiento en el sentido de las agujas del reloj hasta que los resortes se compriman.

NOTA: Si siente demasiada presión, libere la presión girando la perilla de tratamiento en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Comience el tratamiento girando la perilla de tratamiento según las indicaciones de su médico o terapeuta.
- Al final de la sesión de terapia, libere la presión girando la perilla de tratamiento en sentido contrario a las agujas del reloj, desate las correas y retire el dispositivo.



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO RECOMENDADO

Use el dispositivo dinámico JAS mientras esté inactivo, preferiblemente mientras duerme. Si no puede dormir con el dispositivo, use el dispositivo el mayor tiempo posible durante el día. El tiempo dedicado al uso del dispositivo es el componente más importante para recuperar el rango de movimiento.

PASO 1: Determinar la tensión del tratamiento: Coloque la extremidad al final del rango de movimiento activo antes de poner el dispositivo dinámico JAS. Gire la manilla para terapia hasta que sienta la tensión/resistencia del resorte. Continúe girando la manilla para terapia hasta que sienta un estiramiento de baja intensidad.

PASO 2: Determinar el tiempo de tratamiento: El médico o terapeuta del paciente debe establecer el tiempo máximo de tratamiento. Comience con 1-2 horas de tiempo de uso y aumente hasta 6-8 horas de uso continuo por día.

- Si durante la sesión de tratamiento, la intensidad de estiramiento disminuye significativamente, gire la manilla para terapia hasta que nuevamente sienta resistencia / estiramiento de baja intensidad por el resorte.
- Disminuya la tensión si no lo puede usar durante períodos prolongados de tiempo.

PASO 3: Remover el dispositivo dinámico JAS: Cuando complete su sesión, gire la manilla para terapia en la dirección opuesta hasta que la tensión del resorte sea liberada, luego retire el dispositivo.

IMPORTANTE

Si experimenta un cambio como hinchazón, sensación o irritación de la piel, suspenda el uso y comuníquese con su médico.

SOPORTE TÉCNICO

Llame a JAS sin costo alguno entre las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. CST al (800) 879-0117 para asistencia técnica y preguntas sobre su dispositivo JAS.

DEVOLUCIÓN DEL DISPOSITIVO

Este es un dispositivo de alquiler. Al final de su tratamiento, es **su responsabilidad** contactar a JAS para finalizar la facturación y organizar la devolución del dispositivo.



Joint Active Systems, Inc.

2600 South Raney • Effingham, IL 62401

TEL: (217) 342-3412 o (800) 879-0117

Email: info@jointactivesystems.com

www.jointactivesystems.com

Cubierto por una o más patentes estadounidenses. Otras patentes pendientes. Con licencia en el estado de Illinois.