



**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
DEL CODO**




JAS DYNAMIC™ CODO


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Le recomendamos que esté sentado o recostado en una posición cómoda para realizar su sesión de tratamiento con el dispositivo JAS.

NO SE PONGA DE PIE NI CAMINE CON EL DISPOSITIVO PUESTO

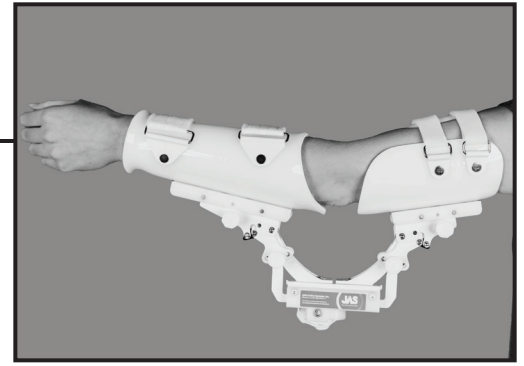

PASO 1: AJUSTAR EL ÁNGULO INICIAL

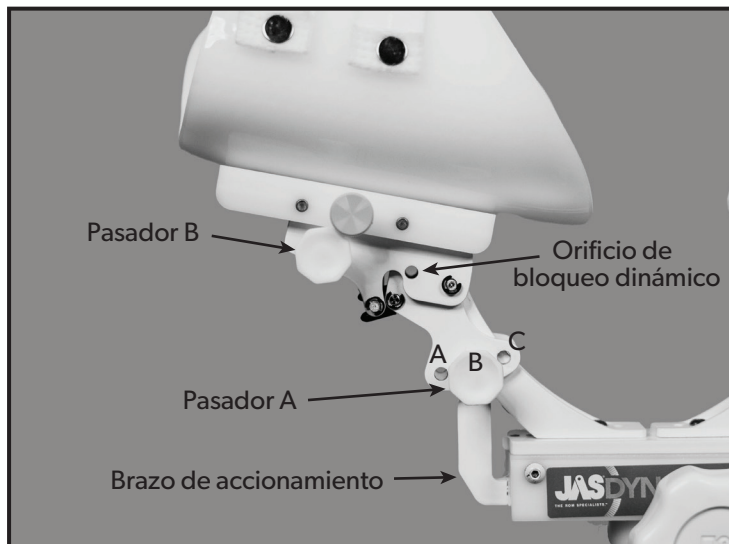


Orificio A: Hiperextensión de 40° – Flexión de 57°

Orificio B: Flexión de 14° – Flexión de 111°


Orificio C: Flexión de 68° – Flexión de 166°

Bloqueo dinámico: Este dispositivo cuenta con pasadores en la posición dinámica. Para bloquear la función dinámica, ubique el pasador B (uno de cada lado del dispositivo) en los orificios de bloqueo dinámico, como se muestra en la imagen.

CONSEJOS DE USO

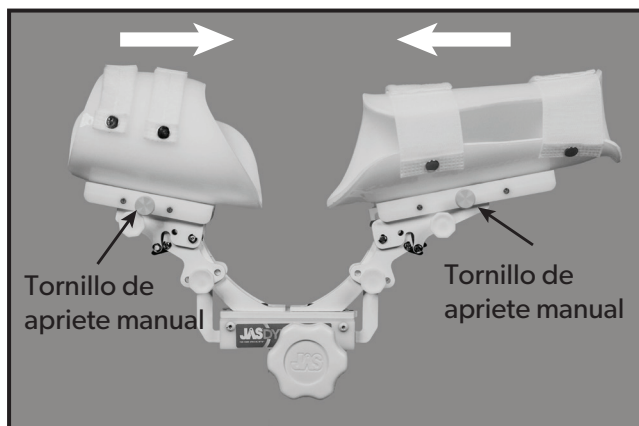

Posición de extensión: A medida que el rango de extensión del brazo aumente, afloje los tornillos de apriete manual y ajuste los brazaletes hacia el centro del dispositivo.

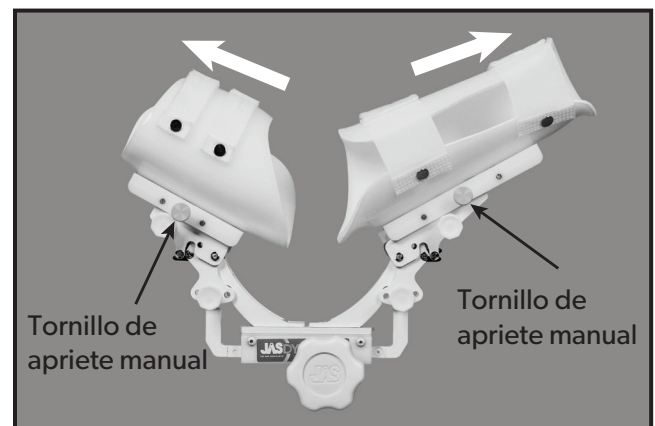

Posición de flexión: A medida que la capacidad de flexión del brazo mejore, afloje los tornillos de apriete manual y aleje los brazaletes del centro del dispositivo.




JAS DYNAMIC™ CODO


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Le recomendamos que esté sentado o recostado en una posición cómoda para realizar su sesión de tratamiento con el dispositivo JAS.

NO SE PONGA DE PIE NI CAMINE CON EL DISPOSITIVO PUESTO

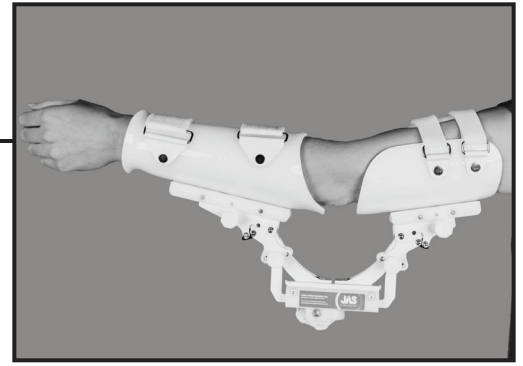


PASO 2: PONER EL BRAZO EN EL DISPOSITIVO

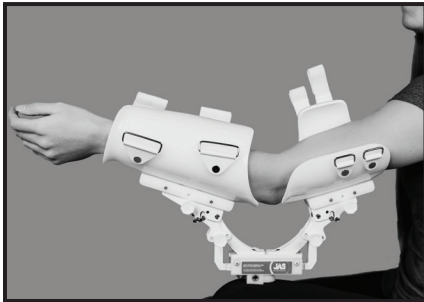

- Afloje todas las correas.
- Gire la perilla de tratamiento para extender el dispositivo al máximo.
- Coloque el dispositivo debajo del brazo y alinéelo de modo que el bastidor quede centrado debajo del codo.


NOTA: El brazaletes superior está marcado con una etiqueta.

PASO 3: AJUSTAR EL ÁNGULO DEL DISPOSITIVO AL BRAZO

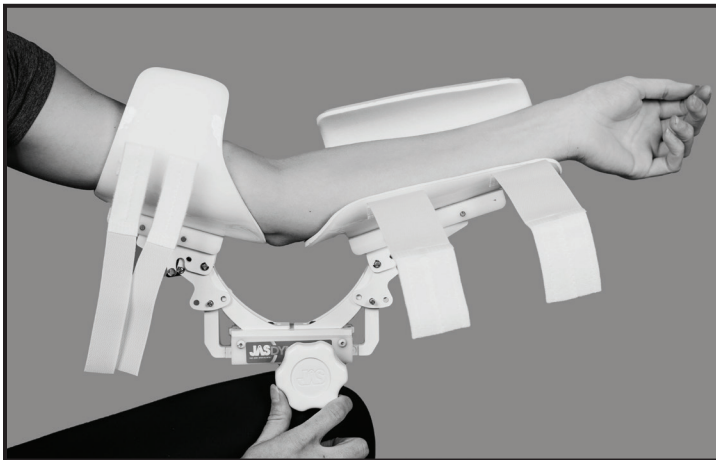


- Gire la perilla de tratamiento hasta el ángulo del brazo correspondiente a la posición de estiramiento deseada.

PASO 4: ASEGURAR LAS CORREAS

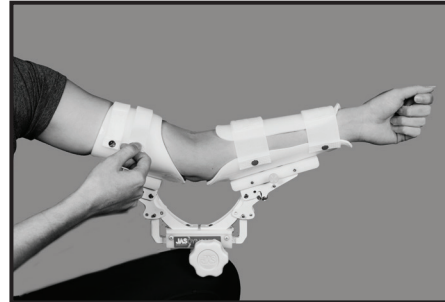

- Asegure todas las correas para que queden bien apretadas.

PASO 5: COMENZAR EL TRATAMIENTO

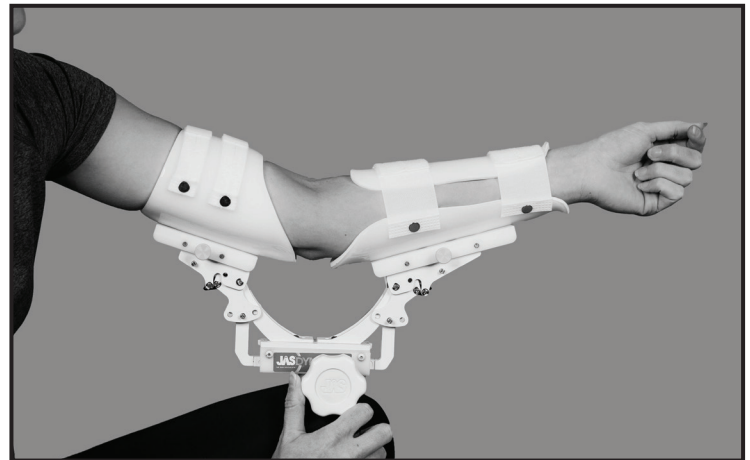

- Gire la perilla de tratamiento en sentido antihorario para extender el brazo o en sentido horario para flexionarlo.

NOTA: Si siente demasiada presión, gire la perilla de tratamiento en el sentido contrario para aliviar la presión.

- Para comenzar el tratamiento, gire la perilla de tratamiento según le indique el médico o el terapeuta.
- Al final de la sesión de tratamiento, gire la perilla de tratamiento en la dirección opuesta para aliviar la presión, quite las correas y quítese el dispositivo.



JAS DYNAMIC[™]

THE ROM SPECIALISTS[®]

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO RECOMENDADO

Use el dispositivo dinámico JAS mientras esté inactivo, preferiblemente mientras duerme. Si no puede dormir con el dispositivo, use el dispositivo el mayor tiempo posible durante el día. El tiempo dedicado al uso del dispositivo es el componente más importante para recuperar el rango de movimiento.

PASO 1: Determinar la tensión del tratamiento: Coloque la extremidad al final del rango de movimiento activo antes de poner el dispositivo dinámico JAS. Gire la manilla para terapia hasta que sienta la tensión/resistencia del resorte. Continúe girando la manilla para terapia hasta que sienta un estiramiento de baja intensidad.

PASO 2: Determinar el tiempo de tratamiento: El médico o terapeuta del paciente debe establecer el tiempo máximo de tratamiento. Comience con 1-2 horas de tiempo de uso y aumente hasta 6-8 horas de uso continuo por día.

- Si durante la sesión de tratamiento, la intensidad de estiramiento disminuye significativamente, gire la manilla para terapia hasta que nuevamente sienta resistencia / estiramiento de baja intensidad por el resorte.
- Disminuya la tensión si no lo puede usar durante períodos prolongados de tiempo.

PASO 3: Remover el dispositivo dinámico JAS: Cuando complete su sesión, gire la manilla para terapia en la dirección opuesta hasta que la tensión del resorte sea liberada, luego retire el dispositivo.

IMPORTANTE

Si experimenta un cambio como hinchazón, sensación o irritación de la piel, suspenda el uso y comuníquese con su médico.

SOPORTE TÉCNICO

Llame a JAS sin costo alguno entre las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. CST al (800) 879-0117 para asistencia técnica y preguntas sobre su dispositivo JAS.

DEVOLUCIÓN DEL DISPOSITIVO

Este es un dispositivo de alquiler. Al final de su tratamiento, es **su responsabilidad** contactar a JAS para finalizar la facturación y organizar la devolución del dispositivo.



Joint Active Systems, Inc.

2600 South Raney • Effingham, IL 62401

TEL: (217) 342-3412 o (800) 879-0117

Email: info@jointactivesystems.com

www.jointactivesystems.com

Cubierto por una o más patentes estadounidenses. Otras patentes pendientes. Con licencia en el estado de Illinois.