



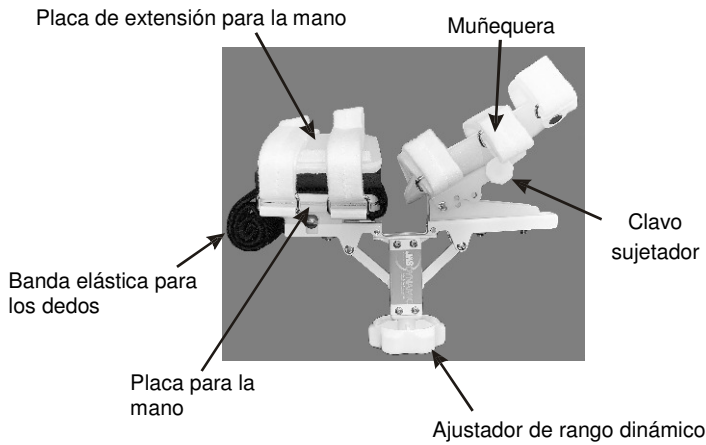

# JAS DYNAMIC MCF FLEXIÓN


## INSTRUCCIONES DE AJUSTE

La mejor forma de realizar su sesión de terapia JAS es sentado cómodamente.

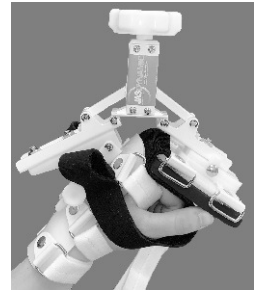

### PASO 3:


#### AJUSTE DE LA PLACA PARA LA MANO

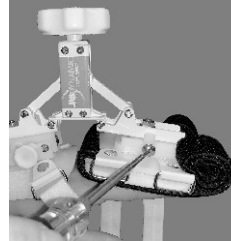

- Ajuste la posición de la placa para la mano a aproximadamente 1/2 pulg. distal a la articulación MCF.

### PASO 4:

#### ASEGURE LA CORREA DE LA MANO

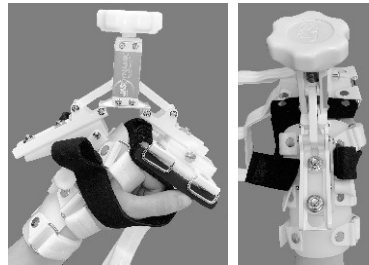

- Coloque la banda elástica alrededor de la mano para estirar los dedos hasta hacer un puño.
- Asegure la banda elástica para los dedos en la parte posterior de la muñequera.
- Nota: Puede que tenga que cortar la banda elástica para los dedos para que ajuste bien.

### PASO 5:

#### COMIENCE LA TERAPIA



- Comience el tratamiento girando la perilla del ajustador de rango dinámico tal y como le indique su médico o terapeuta.
- Al finalizar su sesión de terapia, gire la perilla del ajustador de rango dinámico para liberar la presión, suelte las correas y retire el dispositivo.

Placa de extensión para la mano


Muñequera

Clavo sujetador


Banda elástica para los dedos

Placa para la mano

Ajustador de rango dinámico

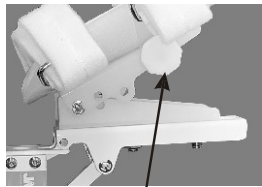


Clavo sujetador en posición dinámica

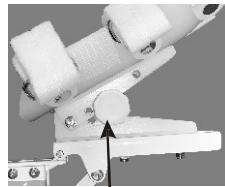

Clavo sujetador en posición de bloqueo dinámico

### PASO 1:

#### COLOQUE EL DISPOSITIVO EN LA MANO

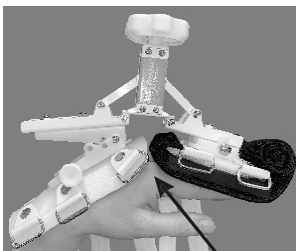

Articulación MCF


- Retire la placa de extensión para la mano.
- Coloque el aparato encima de la mano.
- Alinee la articulación MCF debajo del centro del aparato.



La parte gruesa de la almohadilla de espuma hacia el dedo meñique

### PASO 2:

#### ASEGURE LAS CORREAS DE LA MANO

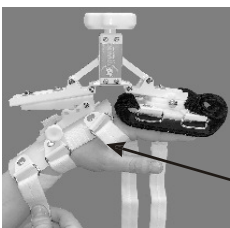

Si se siente incómodo, no use esta correa.



# JAS DYNAMIC MCF EXTENSIÓN

## INSTRUCCIONES DE AJUSTE

La mejor forma de realizar su sesión de terapia JAS es sentado cómodamente.

Placa de extensión para la mano


Muñequera

Banda elástica para los dedos

Clavo sujetador


Placa para la mano

Ajustador de rango dinámico

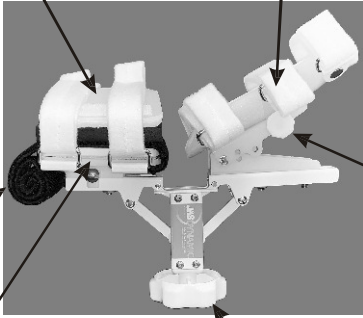


### PASO 1:

#### VUELVA A COLOCAR EL CLAVO SUJETADOR

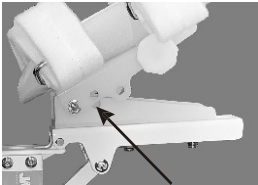

Agujeros alineados

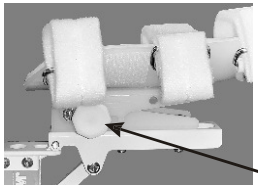


Clavo sujetador en posición estática

- Quite el clavo sujetador de la ubicación actual.
- Presione la muñequera hasta que los 2 agujeros más cerca del centro del aparato estén alineados.
- Inserte el clavo sujetador en los agujeros alineados para que el aparato quede en posición estática

### PASO 2:

#### COLOQUE EL DISPOSITIVO EN LA MANO

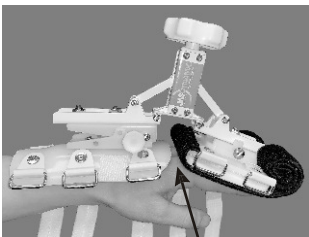


Articulación MCF


- Coloque el aparato encima de la mano.
- Alinee la articulación MCF debajo del centro del aparato.

### PASO 3:

#### ASEGURE LAS CORREAS DE LA MANO

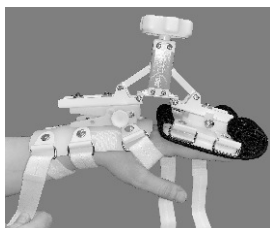


- Asegure las correas para la mano hasta que queden cómodamente ajustadas.

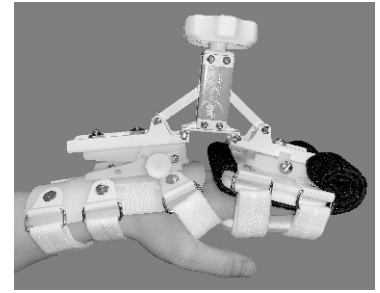

### PASO 4:


#### AJUSTE DE LA PLACA PARA LA MANO

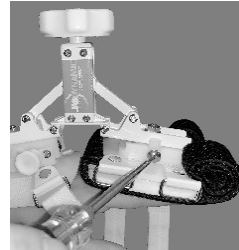

- Ajuste la posición de la placa para la mano a aproximadamente 1/2 pulg. distal a la articulación MCF.

### PASO 5:

#### ASEGURE LAS CORREAS DE LOS DEDOS

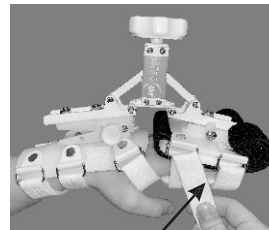


Placa de extensión para la mano

- Coloque la placa de extensión para la mano debajo de los dedos.
- Asegure las correas para los dedos hasta que queden cómodamente ajustadas.

### PASO 6:

#### COMIENCE LA TERAPIA

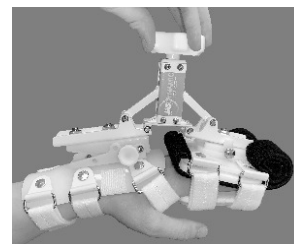

- Comience el tratamiento girando la perilla del ajustador de rango dinámico tal y como le indique su médico o terapeuta.

- Al finalizar su sesión de terapia, gire la perilla del ajustador de rango dinámico para liberar la presión, suelte las correas y retire el dispositivo.



## PROCOLO DE TRATAMIENTO RECOMENDADO

---

Estas son solo reglas generales. Retire el aparato dinámico JAS si siente dolor en cualquier momento y comuníquese con su asesor en ventas de Joint Active Systems.

**PASO 1: Determine la tensión para el tratamiento:** Lleve la extremidad hasta el final de la amplitud de movimiento antes de colocar el aparato dinámico JAS. Una vez colocado el aparato, gire la perilla de ajuste hasta que sienta la tensión/resistencia de resorte. Continúe girando la perilla de ajuste hasta que sienta un estiramiento de baja intensidad.

**PASO 2: Determine el tiempo de tratamiento:** El médico o terapeuta del paciente debe establecer el tiempo máximo de tratamiento. Comience con 1 a 2 horas de uso y aumente poco a poco hasta 6 a 8 horas de uso continuo por día.

Si durante la sesión de tratamiento la intensidad del estiramiento disminuye considerablemente, gire la perilla de ajuste hasta que sienta otra vez la resistencia de resorte/estiramiento de baja intensidad.

Disminuya la tensión si no puede usarlo por largos períodos de tiempo.

**PASO 3: Retirar el aparato dinámico JAS:** Cuando termine su sesión, gire la perilla de ajuste en la dirección opuesta hasta soltar la tensión de resorte, luego retire el aparato.

---

### IMPORTANTE:

Use el aparato dinámico JAS cuando esté inactivo, preferiblemente mientras duerme. Si no puede dormir con el aparato, úselo el mayor tiempo posible durante el día.

El tiempo que pase usando el aparato es el componente más importante para recuperar la amplitud de movimiento. *Aumentar la tensión hasta niveles muy fuertes o dolorosos no garantiza que se aplicará el estiramiento adecuado.*

Si nota un cambio en la hinchazón, sensación o irritación de la piel, deje de usarlo y comuníquese con su médico.

### APOYO TÉCNICO

Para recibir asistencia técnica o si tiene alguna pregunta sobre su aparato JAS, llame gratis al (800) 879-0117.

### DEVOLUCIÓN DEL APARATO

Este aparato es alquilado. Al finalizar el tratamiento, es **su responsabilidad** comunicarse con JAS para finalizar la facturación y coordinar la devolución del aparato.



#### Joint Active Systems, Inc.

2600 South Raney • Effingham, IL 62401

TELF: (217) 342-3412 o (800) 879-0117

Correo electrónico: [info@jointactivesystems.com](mailto:info@jointactivesystems.com)

[www.jointactivesystems.com](http://www.jointactivesystems.com)

Cubierto por una o más patentes de los EE. UU. Otras patentes están en trámite.

Autorizado en el Estado de Illinois.